

fitFORM
member of Wellco™

Fitform Pflege-Kollektion

Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen

Abb. Modell 570 Vario

Gesundes Sitzen für jeden

Speziell für Menschen die einen großen Teil des Tages im Sitzen verbringen und für die gutes Sitzen nicht selbstverständlich ist, hat Fitform die Sessel der Pflege-Kollektion entwickelt. Diese Sessel bieten zahlreiche, individuelle Sitzlösungen und können vollständig an Ihre persönlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mehr als 75.000 zufriedene Nutzer sprechen dabei für sich.

Komfortabel sitzen, ausruhen und bequem aufstehen

Langes, starres Sitzen ist nicht gesund. Darum verfügen die Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion über Elektromotoren und können mittels einer Handbedienung in verschiedene Positionen verfahren werden.

Die vornehmlich eingesetzte Variante verfügt über 3 Motoren und bietet folgende Funktionen:

Beinstütze

Mit Hilfe der gelben Tasten fährt die Beinstütze heraus, hebt Ihre Beine an und lässt sie dadurch ohne Druck entspannen.

Kantelverstellung

Durch Drücken der roten Taste wird die Kantelverstellung aktiviert. Hierbei fährt die Rückenlehne zusammen mit der Sitzfläche als eine Einheit nach hinten, ohne das sich der Sitzwinkel ändert. Sie rutschen nicht aus dem Sessel und die

Rückenbelastung wird damit stark vermindert. Ein außergewöhnlich gutes Sitzgefühl stellt sich ein.

Verstellung der Rückenlehne

Mit den blauen Tasten können Sie den Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche einstellen. Wenn Sie bereits die Kantelverstellung angewendet haben, können Sie die Rückenlehne so noch weiter nach hinten bewegen um in eine Liegeposition zu gelangen. Ihre Beine liegen jetzt höher als das Herz. Man spricht von der sog. Herz-Waage-Position.

Aufstehfunktion

Die Aufstehfunktion hilft Ihnen auf Tastendruck deutlich bequemer aus dem Sessel aufzustehen. Dadurch das der gesamte Sessel angehoben und leicht nach vorne gekippt wird, bleiben dabei Ihre Füße auf dem Boden. So haben Sie einen festen Stand und können einfach aus dem Sessel aufstehen. Auch das Hineinsetzen wird deutlich leichter, wenn sich der Sessel in der Aufstehposition befindet.



Maßarbeit

Die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion wurden entwickelt um Ihr Leben angenehmer zu machen. Da jeder Mensch unterschiedlich ist, sind diese Sessel auf Maß einstellbar. Die Sitzhöhe, die Sitztiefe und die Armlehnenhöhe können individuell für Sie eingestellt werden. Die eingebaute Lendenstütze können Sie eigenständig in der gewünschten Höhe und Dicke einstellen.



Das gilt auch für die integrierte knickbare Kopfstütze. Die Oberseite der Rückenlehne können Sie dabei nach vorne biegen. Wir nennen das die "Topswing-Kopfstütze".

- 1 Sitzhöhe einstellbar von 40 bis 60 cm
- 2 Sitztiefe einstellbar von 43 bis 53 cm
- 3 Armlehnenhöhe von 16 bis 29 cm
- 4 Lendenstütze in Höhe und Dicke einstellbar
- 5 Sitzwinkel verstellbar

3 Modelle: 1 Ziel

Im Mittelpunkt unserer Entwicklungsarbeit steht der Mensch. Unser Ziel ist der bestmögliche Sitzkomfort und die optimale Sitzlösung für jeden unserer Nutzer. Damit zudem auch die optischen Vorgaben unserer Kunden nicht unberücksichtigt bleiben, können Sie aus drei unterschiedlichen Modellen wählen:



Modell 560 Vario



Modell 570 Vario



Modell 574 Vario



Eine passende Lösung für jedes Sitzproblem

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung mit den verschiedensten Sitzproblemen, ist das Sortiment der Optionen und speziellen Anpassungen für die Sessel der Pflege-Kollektion mittlerweile so umfangreich, dass wir auf fast jede Anforderung angemessen reagieren können. Zudem bieten wir eine Reihe nützlicher Accessoires und Zubehör an, die Ihren Fitform-Sessel noch komfortabler machen.

Exakt auf Maß

Neben den Standard Einstellmaßen der Sessel der Fitform Pflege-Kollektion sind noch zahlreiche weitere Maße möglich.

Die Sitztiefe ist standardmäßig in 6 Stufen einstellbar: 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 cm. Zudem sind auch kleinere und noch größere Sitztiefen möglich.

Die Sitzhöhe kann zwischen 40 und 60 cm eingestellt werden. Um Sitzhöhen von 36 cm, 37 cm, 38 cm und 39 cm zu erzielen, wird ein verändertes Sitzkissen verbaut.

Die Höhe der Armlehnen kann zwischen 16 bis 29 cm eingestellt werden. Für kleinere und höhere Armlehnenhöhen erfolgt ein spezieller Sonderbau.

Die Standard Sitzbreite beträgt 51 cm. Zudem sind Sitzbreiten von 45 cm und 57 cm lieferbar. Sollte der Sessel noch breiter werden, nennen wir ihn Fitform Vario Grande.

Auch die Rückenlehne kann höher und niedriger produziert werden.

Spezielle Anpassungen

Andere Materialien für die Sitzflächen

Die Standard-Sitzfläche eines Fitform-Sessels wird aus Formschaum gefertigt. Diese Schaumqualität ist sehr belastbar, formbeständig und haltbar und fühlt sich zudem komfortabel und fest an. Selbstverständlich kann auch aus anderen Materialien gewählt werden. Wie zum Beispiel eine weichere Sitzfläche aus Latex oder eine Antidekubitus-Sitzfläche aus visko-elastischem Schaum die sich Ihrem Körper anpasst. Menschen die sehr viel sitzen und einem hohen Dekubitus-Risiko unterliegen empfehlen wir Intelli-Gel. Eine Gel-Sitzfläche mit Wabenstruktur die für eine optimale Druckverteilung sorgt. Zudem kann ein Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion mit einer gepolsterten Sitzplatte geliefert werden, auf der spezielle Sitzkissen sowie Sitzschalen angebracht werden können.



Visko-elastischer Schaum



Intelli-Gel® Sitzfläche



Arthrodesse-Sitz

Andere Materialien für die Rückenlehne

Die Rückenlehnen der Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion werden standardmäßig mit Formschaum ausgeführt. Diese Schaumqualität ist sehr belastbar, formbeständig und haltbar und fühlt sich zudem fest aber komfortabel an. Zudem kann aus anderen, weicheren Materialien wie zum Beispiel Latex oder visko-elastischem Schaum gewählt werden.

Andere Materialien auf Armlehnen und/oder Beinstützen

Für Menschen die sehr schmerzempfindlich unter den Armen oder Beinen sind, kann auf weichere und/oder druckentlastende Materialien ausgewichen werden.

Besondere Bezüge

Für die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion stehen zahlreiche unterschiedliche Bezugsstoffe zur Verfügung. Abhängig von den individuellen Anforderungen kann aus speziellen Bezügen gewählt werden. Beispielsweise wird mit STAMSKIN ein wasserfester Bezug speziell für den Inkontinenz-Einsatz angeboten. Er ist antibakteriell, pflegeleicht und besonders für Räume mit hohen Hygiene-Vorgaben geeignet. Ebenfalls bei Inkontinenz kann auch auf den NIROXX-Bezug zurückgegriffen werden. Dieser ist wasserabweisend, schimmelhemmend und antibakteriell beschichtet, vermittelt jedoch das wohnliche Gefühl eines herkömmlichen Microfaser-Bezuges. UNIFORM ist ein elastischer und damit nach beiden Richtungen dehnbarer Bezugsstoff, der besonders für individuelle Anpassungen im Sitz- und Rückenlehnenbereich geeignet ist. SARKOTEX ist ein elastischer Kunststoffbezug, der sowohl dehnbar wie auch wasserdicht und luftdurchlässig ist. Alle diese Bezüge sind selbstverständlich schwer entflammbar und erfüllen die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben.

Arthrodesse-Sitz

Die Arthrodesse-Sitzfläche wird speziell für Personen mit einer Beinamputation (Prothese) oder einer Hüft-/ Knieversteifung empfohlen. Diese geteilte Sitzfläche kann links, rechts oder an beiden Seiten einstellbar ausgeführt werden. Bei ausgefahrener Fußstütze kann die jeweilige Höhe an der Unterseite der Sitzfläche eingestellt werden (Bereich ca. 8 cm). In Kombination mit der verstellbaren Rückenlehne lässt sich so bequem der passende Sitzwinkel bereitstellen. Bei dem Ausfahren der Fußstütze kommt die Sitzfläche für eine gute Beinunterstützung automatisch nach Oben. Mit Hilfe der Rückenverstellung kann jederzeit der gewünschte Sitzwinkel eingestellt werden. Für jede Sitztiefe wird eine spezielle Sitzfläche angefertigt. Der feste (nicht einstellbare) Bereich hat hierbei immer eine Tiefe von 12 cm. Die Beinstütze wird bei dieser Option mit einem Zwischenteil ausgeführt.

Kyphose-Rückenlehne einstellbar

Das Mittelteil der Rückenlehne (Position der Wirbelsäule) wird mit weicheren Schäumen ausgeführt. Personen mit Kyphose (Wirbelsäulen-Verkrümmung) können so deutlich komfortabler sitzen. Die Wirbelsäule kann tiefer einsinken. Zusätzlich verfügt diese Rückenlehne neben der Top-Swing-Kopfstütze über einen zweiten Knickpunkt. So kann die Rückenlehne optimal an den Rücken angepasst werden.

Verbreiterte Armlehnen

Um die Körperstabilität und die Armunterstützung zu optimieren, können die gepolsterten Armlehnen sowohl nach Innen wie auch nach Außen verbreitert geliefert werden.



Fitform 570 Vario Grande



Hemiplegie-Armlehnen



Abklappbares Seitenteil



Kopf- und Nackenkissen



Drehscheibe



Verlängerte Fußstütze

Die Fußstütze eines richtig angemessenen Fitform-Sessels ist lang genug um die Unterschenkel komplett zu unterstützen. Sie endet vor der Ferse. In bestimmten Fällen wird jedoch auch eine zusätzliche Unterstützung der Ferse/ Füße gewünscht. Hierfür bieten wir die Option der zusätzlich verlängerten Fußstütze. Bei dem Ausfahren der Fußstütze fährt automatisch eine ca. 8 cm Verlängerung aus. Sie ist federnd gelagert, dass die Beine / Füße nicht überdehnt werden.

Schalenform-Rückenlehne

Diese Rückenlehne wird (ähnlich einem sportlichen Autositz) schalenförmig ausgeführt, um einen stärkeren Seitenhalt zu erzielen. So wird eine bessere Körperstabilität hergestellt und ein seitliches Herausrutschen minimiert.

Hemiplegie-Armlehnen

Diese Armlehnen wurden speziell für Personen mit halbseitiger Lähmung entwickelt. Ein häufiges Problem bei Personen mit einer Hemiplegie sind Schmerzen in der Schulter, Unterarm oder Hand. Durch den individuellen Aufbau einer Hemiplegie-Armlehne, entsteht eine optimale Unterstützung und eine Linderung der Schmerzen. Die Armlehnenführung besteht aus einer Basis-Schale aus Kunststoff und verschiedener Unterstützungsformen. In Abhängigkeit von den individuellen Ansprüchen kann aus 3 verschiedenen Formen gewählt werden. Die Hemiplegie-Armlehne wird an dem Sitz des Sessels montiert, so dass diese einer Kippverstellung des Sessels folgt.

Abklappbares Seitenteil

Dank eines abklappbaren Seitenteils ist für Rollstuhlfahrer ein leichter Transfer in den Sessel möglich. Diese Option wird manuell sowie elektrisch angeboten.

Optionen & Zubehör

Durch unzählige Optionen und individuelle Anpassungen bieten die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion Lösungen für viele Krankheitsbilder und Handicaps.

Kopf- und Nackenkissen

Für eine zusätzliche, optimale Unterstützung ihres Kopfes und Nackens bietet Fitform verschiedene Kopf- und Nackenkissen. Sie sind durch ein Gegengewicht höhenverstellbar und außerdem in unterschiedlichen Dicken, Abmessungen, Formen und mit unterschiedlichen Füllungen erhältlich.

Drehscheibe


Mit Hilfe der Drehscheibe unterhalb des Sessels wird dieser zum Drehsessel und lässt sich um 2 x 180° drehen. Um sicher aufstehen und einsteigen zu können, wird die Drehscheibe in der Aufstehposition automatisch blockiert.

Akku

Das herumliegende Kabel im Zimmer ist bei einem elektrisch verstellbaren Sessel mit diesem optional zu bestellenden Akku passé. Gebrauchtsabhängig ist der Sessel ca. 14 Tage lang mit dem Akku nutzbar. Ein Tonsignal erinnert an ein notwendiges Laden des Akkus. Mit Hilfe des beiliegenden Ladekabels sollte der Akku dann umgehend geladen werden.

Infrarot Handbedienung

Die Infrarot-Handbedienung ist schnurlos, modern gestaltet und erlaubt eine Bedienung auch aus einiger Entfernung. Es wird ein "Blick-Kontakt" zwischen Handbedienung und Empfänger am Sessel benötigt.

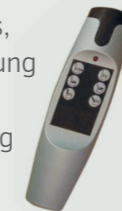


Heizung

Ein besonderer Genuss in den kalten Wintermonaten: Heizung in Sitz und Rücken. Gesteuert wird die 3-stufige Heizung mit einem separaten Handschalter.

Elektrisch verstellbare

"Topswing-Kopfstütze"

Die Sessel unserer Pflege-Kollektion verfügen über eine serienmäßige "Topswing-Kopfstütze". Durch einen zusätzlichen Motor, kann diese Kopfstütze elektrisch in die gewünschte Position gebracht werden. (Nur in Kombination mit dem Topline-Paket!)

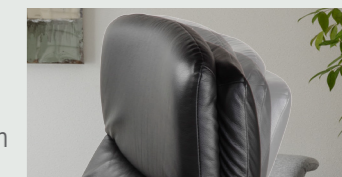

Memory-Funktion

Mit Hilfe von Memory-Tasten auf der speziellen Handbedienung können 2 individuelle Sesselpositionen gespeichert werden. (Nur in Kombination mit dem Topline-Paket!)

Elektrisch aufblasbare Lendenstütze

Mit Hilfe dieser Option können Sie, im Sessel sitzend, die gewünschte Unterstützung der Lendenstütze elektrisch einstellen. (Nur in Kombination mit dem Topline-Paket!) Wenn es gewünscht wird den Luftdruck in der serienmäßigen aufblasbaren Lendenstütze regelmäßig zu ändern, ist es nun in Kombination mit dem Topline-Paket möglich, eine elektrisch aufblasbare Lendenstütze zu bestellen. Wie die manuelle Ausführung, ist auch diese Lendenstütze zusätzlich per Hand in der Höhe verstellbar (hinter dem Reißverschluss an der Sesselrückseite). Gesteuert wird die Aufblasfunktion mit Tasten der Topline-Handbedienung.

Topline-Paket

Für besondere Anforderungen an Komfort und Bedienung haben wir ein spezielles Topline Options-Paket zusammengestellt. Es besteht aus: elektrisch verstellbarer Kopfstütze / Memory-Funktion / elektrische Lendenstütze und Heizung in Sitz und Rücken. Alle Funktionen werden hierbei über Tasten der speziellen Topline-Handbedienung gesteuert.





Rolltisch



Mobility Kit



Tablett (Holzoptik oder transparent)

Rollensystem selbstbremsend

Hiermit kann der Sessel über kleinere Abstände fortbewegt werden. Ein Fitform-Sessel mit Laufrollen lässt sich nur unbelastet (ohne dass jemand darin sitzt) auf glattem Boden fortbewegen. Die Rollen sind selbstbremsend, so dass es keine Unfälle geben kann. Mit Hilfe eines kleinen Hebels (hinter dem Reißverschluss auf der Sesselrückseite) stellen Sie den Bodenkontakt der Rollen her. Die vorderen Rollen sind sichtbar und eine dritte Lenkrolle an der Rückseite stellt den Bodenkontakt her.

Mobility Kit

Für den Transport von Sessel inkl. Person wurde das Mobility-Kit entwickelt. Mit Hilfe des großen Schiebegriffes an der Rückseite des Sessels ist ein komfortables Bewegen möglich. Und das mit wenig Kraftaufwand. Der Sessel verfügt hierfür über 4 Räder. Wird der Griff nach Unten gedrückt sind die Räder ungebremst und der Sessel kann verrollt werden. Wird der Griff losgelassen, sind die Räder wieder gebremst. So wird ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert. Das System wurde nicht entwickelt um Personen über sehr weite Entfernung zu bewegen und funktioniert nur auf glatten Böden! Kanten und Absätze sind zu meiden.

Inkontinenzmatte

Das ist eine flexible, waschbare Einlegematte die auf der Sitzfläche platziert wird, wenn das Risiko für Inkontinenz gegeben ist. Die Oberseite wird aus dem Bezug des Sessels gefertigt, die Unterseite besteht aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material.

Rolltisch

Wenn Sie gerne in Ihrem Sessel arbeiten, essen und lesen möchten, bietet der Rolltisch die passende Lösung hierfür. Der Rolltisch wird auf Maß Ihres Sessels gefertigt und lässt sich sehr leicht verrollen.

Leselampe

Diese elegante Leselampe wird an der Armlehne des Sessels befestigt und dient dem Benutzer jederzeit als gute Lichtquelle. Diese Lampe gibt Ihnen gutes Licht um in Ihrem Sessel entspannend zu lesen. Die Leselampe wird an der Armlehne des Sessels befestigt. Die LED-Leuchte ist sparsam, hat eine Lebenszeit von ca. 100.000 Stunden und gibt nur sehr wenig Wärme ab.

Schwenkbare Arbeitsfläche

Eine schwenkbare Arbeitsfläche aus transparentem Kunststoff oder in Holzoptik wird auf einem Metallträger an den Kufen des Sessels befestigt. Sie besticht durch eine moderne Optik. Diese Arbeitsfläche ist sinnvoll für Benutzer die im Sessel essen, lesen und andere Tätigkeiten ausüben möchten. Sie bleibt stets in der horizontalen Position und kann vom Sessel weggedreht werden. Eine Montage ist links wie rechts möglich.

Tablett (Holzoptik oder transparent)


Das speziell für die Fitform Sessel der Pflege-Kollektion entwickelte Tablett, ermöglicht es optimal in dem Sessel zu essen, arbeiten oder zu lesen. Das Tablett ist lieferbar in einer Holzoptik sowie in einer transparenten Variante. Es wird einfach über die Armlehnen des Sessels geschoben. Da es nicht fest mit dem Sessel verbunden ist, besteht auch bei Nutzung der Kippfunktionen keine Beschädigungs-Gefahr. Mit Hilfe der optionalen Hängevorrichtung kann das Tablett vernünftig am Seitenteil des Sessels aufgehängt werden und ist stets griffbereit.

Nicht alle Anpassungen, Optionen, Zubehör und Abmessungen sind miteinander kombinierbar. Ihr Fitform-Fachhändler vor Ort berät Sie kompetent und umfassend.

Gesundes sitzen = bewegtes sitzen

Da Bewegung besser ist als Sitzen, kann Fitform zwei verschiedene Bewegungstechniken in Ihrem Sessel integrieren. Wir nennen sie RCPM und fitMotion. RCPM hilft im Kampf gegen Rückenschmerzen. fitMotion hingegen wurde für Menschen entwickelt, die lange stillsitzen und dadurch Dekubitus gefährdet sind.

Ausführliche Informationen über diese Bewegungs-Module finden Sie in unserer Broschüre „Gesundes Sitzen“ sowie auf www.fitform.net/de/startseite/sitzen

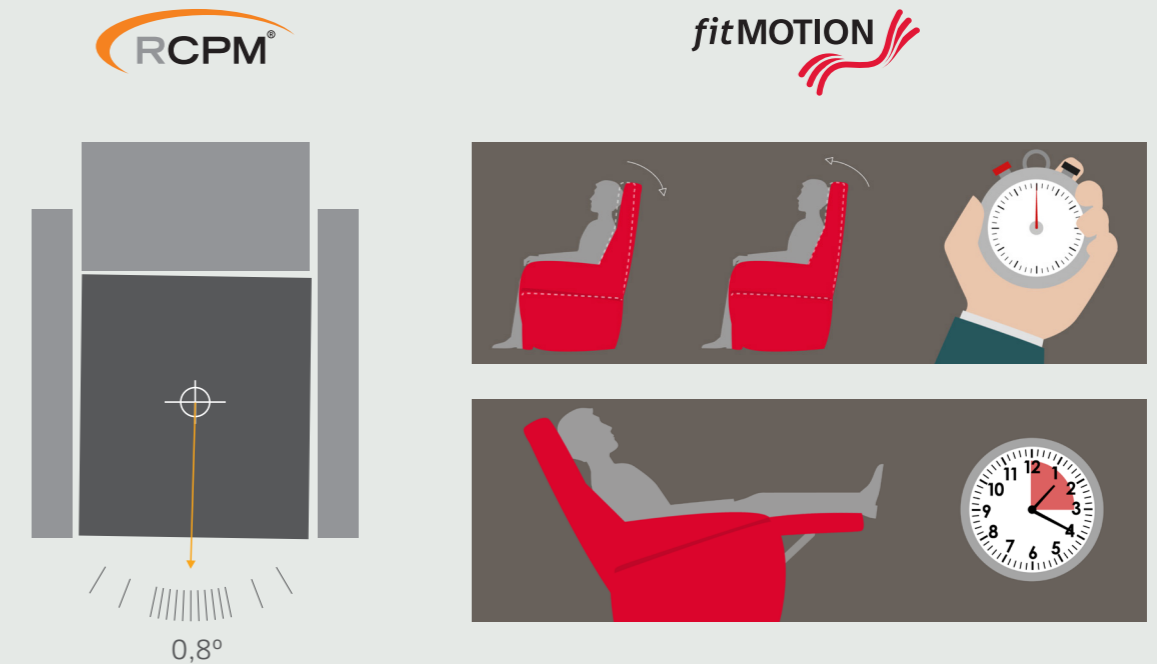

Das AGR-Gütesiegel

Der **Verein Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR)**, Bremervörde in Deutschland sieht es als Hauptzweck, Rückenschmerzen vorzubeugen. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, Menschen in verschiedenen Lebensphasen über die richtigen Produkte zu beraten, so dass Rückenschmerzen rund um die Uhr vermieden werden können.

Weil häufig nicht genügend Know-how angesichts ergonomischer Aspekte verfügbar ist, um die richtige Produktwahl zu treffen, hat AGR ein Prüfzeichen ins Leben gerufen: das AGR-Gütesiegel. Dieses kann nur nach umfassenden Prüfungen durch unabhängige Sachverständige erworben werden. Bereits im Jahre 2000 hat Fitform die AGR-Zertifizierung erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.agr-ev.de



Persönliche Situation	Mögliche Problemlösung
Allergie	Bezug Stamskin
Balance-Probleme des körpers (teilweise)	Schalenrückenlehne
Rundrücken, Kyphose	Einstellbare Kyphose-Rückenlehne
Dekubitus unter Sitzfläche (Grad 2)	Intelli-Gel
Dekubitus Risiko unter Sitzfläche	Antidekubitus Sitzflächen (Visko) f. verschiedene Körpergewichte
Dekubitus Risiko unterer Rücken/oberer Rücken	Rückenlehne mit einer Lage oder komplett Visko-Schaum oder Latex
Dekubitus Risiko Unterschenkel	Visko-Schaum auf der Beinstütze
Dekubitus Risiko Unterarme	Visko-Schaum auf den Armlehnen
Empfindliches Gewebe, sehr leichte Person	Weiche Sitzfläche für unterschiedliche Körpergewichte
Empfindliches Gewebe Unterarme	Eine Lage Latex auf den Armlehnen
Empfindliches Gewebe unterer Rücken	Rückenlehne mit einer Lage oder komplett Latex
Empfindliches Gewebe Unterschenkel	Eine Lage Latex auf der Beinstütze
Halbseitige Lähmung	Hermiplegie-Armlehne
Inkontinenz zeitweise / Anfangsstadium	Inkontinenzmatte / Bezug Niroxx / Sitzfläche und Rücken Bezug Stamskin
Inkontinenz durchgehend	Sessel-Bezug Stamskin
Inkontinenz + Dekubitus Risiko	Antidekubitus-Sitzfläche (Visko-Schaum oder Intelli-Gel) in Kombination mit Sarkotex-Bezug
Inkontinenz + Dekubitus (ausgeprägt)	Intelli-Gel-Sitzfläche mit Sarkotex-Bezug
Langes starres Sitzen, wenig Bewegung	fitMotion Bewegungs-System
Geistige Einschränkung, Probleme bei Bedienung	Fitform Vario M1 mit 1 Motor und nur 2 Tasten
Nacken-Probleme	Nackenkissen Nr. 5 mit weicher Füllung, elektrische Kopfstütze
Neigung der Arme von den Armlehnen zu gleiten	Breitere Armlehnen nach Innen oder Außen
Notwendigkeit Sessel + Person zu verrollen	Mobility-Kit Rollensystem
Notwendigkeit Sessel (ohne Person) zu verrollen	Laufrollensystem selbstbremsend
Notwendigkeit tägliche Aktivitäten im Sessel zu verrichten	Diverse Tisch-/ Rolltisch-Lösungen sowie Leselampe am Sessel
Notwendigkeit die Fersen zu unterstützen	Zusätzlich verlängerte Fußstütze
Probleme mit Knie und Hüfte	Arthrodese-Sitz in Kombination mit Verstellung der Rückenlehne
Rheumatische Beschwerden, frieren, geringes Gewicht	Heizung in Sitz und Rückenlehne
Risiko Kabel als Stolperfalle	Akku
Risiko das die Beine von der Beinstütze gleiten	Seiten-Pelotten an der Beinstütze
Spastiken	Bezug Stamskin aufgrund des intensiven Gebrauchs
Muskelerkrankungen	Aufstehbewegung Nr. 5, Lift, extra hohes Aufstehsystem
Rollstuhlfahrer mit guter Arm-/ Handfunktion	Wegklappbares Seitenteil mit manueller Bedienung
Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Arm-/ Handfunktion	Wegklappbares Seitenteil mit elektrischer Bedienung
Rückenschmerzen	Verstellbare Lendenstütze (evtl. elektrisch), RCPM-Sitzsystem
Verkrampfte Muskeln	fitMotion Bewegungs-System
Persönliche Maße	Möglichkeiten außerhalb der Standard-Abmessungen
Dünne, schmale Person	Sitzbreite 45 cm
Dünne, kleine Person	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 39-41 cm,
Mini-Ausführung (Sitzbreite 45 cm und Rückenlehne 72 cm)	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 39-41 cm, Rückenlehnenhöhe 72 cm
Kleine Person	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 39-41 cm, Rückenlehnenhöhe 72 cm
Gewichtige Person	Sitzbreite 57 cm mit evtl. Mechanik-Auflastung, Vario Grande, härtere Sitzfläche
Lange Person	Rückenlehne 94 oder 104 cm, Sitztiefe 55-57-59 cm



Abb. Modell 574 Vario

Ihr Fitform-Händler

