



VELA Chair mit Power Wheels



Erfahren Sie hier mehr:
vl1935.dk/power



Power Wheels unterstützt Sie dabei:

- ✓ Selbstständig in Ihrem eigenen Zuhause zu sein
- ✓ Energie zu sparen, wenn Sie eine Pause benötigen
- ✓ Über längere Zeiträume jeden Tag aktiv zu bleiben

Der VELA Tango 700E mit Power Wheels bietet Ihnen alle Vorteile eines VELA-Stuhls, selbst wenn Sie sich nicht den ganzen Tag selbst bewegen können. Führen Sie sämtliche Aktivitäten sicher und bequem durch, unterstützt durch eine sichere Handbremse, leicht rollende Räder und stabilen Sitzkomfort. Selbst wenn Ihre Kraft nachlässt, bleiben Sie mobil, indem Sie die Power Wheels aktivieren.

Verlängern Sie Ihr aktives Leben: Wenn Sie zum Beispiel schnell ermüden oder Gleichgewichtsprobleme haben, kann die Power-Wheels-Funktion Ihre Mobilität und Aktivität den ganzen Tag über sicherstellen.

Erreichen Sie unabhängige Mobilität: Wenn Ihnen die Energie fehlt, den Stuhl zu bewegen und an Aktivitäten teilzunehmen, können Sie Kraft sparen, indem Sie die Power Wheels nutzen und weiter aktive am Leben teilnehmen.

Verbessern Sie Ihre Lebensqualität: Erhöhte Mobilität zu Hause ermöglicht es Ihnen, selbstständiger zu sein - und Unabhängigkeit und Autonomie verbessern Ihre Lebensqualität.

Energie sparen: Durch die aktivierten Power Wheels gewinnt Ihr VELA-Stuhl an zusätzlicher Richtungsstabilität. Sie können so Kraft sparen, indem Sie Ihre Richtung beim Manövrieren des Stuhls nicht korrigieren müssen.

Der VELA Tango 700E mit Power Wheels bietet alle Vorteile des VELA-Stuhls: Ein elektrischer Lift, der die Höhe mühelos per Knopfdruck anpasst, große leichtgängige Räder für einfache Navigation und eine benutzerfreundliche Handbremse für Sicherheit beim Sitzen.

VORTEILE

- :: Sie können alle Tätigkeiten, für die Sie normalerweise stehen müssten, im Sitzen ausführen. Das spart Energie und Kraft.
- :: Sie trüppeln jederzeit sicher und komfortabel - erweitern Sie Ihre Reichweite mit den Power Wheels.
- :: Sanfter und benutzerfreundlicher elektrischer Lift für eine sichere und einfache Höhenverstellung des Stuhls.
- :: Stabiler und sicherer Stuhl mit einer zentralen Bremse und unterstützenden Armlehnen.
- :: Nutzen Sie die Power Wheels nach Bedarf, um den ganzen Tag aktiv zu bleiben und Energie zu sparen.

Hinweis: Power Wheels sind kein Ersatz für einen elektrischen Rollstuhl, sondern eine Unterstützungsfunktion, um den Stuhl fortzubewegen. Eine Faustregel besagt, dass der Stuhl tagsüber aufgeladen werden muss, wenn die Power Wheels häufiger als die Füße genutzt werden, um sich fortzubewegen.

STANDARDKONFIGURATION



VELA Tango 700E mit Power Wheels

MESSUNGEN UND GEWICHT

Höhenverstellung	Elektrisch: 200 mm oder 300 mm Bewegung
Sitzhöhe (Gemessen von der unteren Kante des Sitzes) Sitzhöhe: +6,0 cm bei allen Standardsitzen	Bei 200 mm: 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm Bei 300 mm: 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
Alle Sitzhöhen sind ohne Belastung gemessen	
Sitz, Breite x Tiefe	Active X-small: 40 x 40 cm (nur Active) Active/Contour Small: 44 x 44 cm Active/Contour Medium: 47 x 47 cm Active/Contour Large: 50 x 50 cm
Sitzwinkel	10° vorwärts, 15° rückwärts
Rückenlehne, Breite x Höhe	Active X-small: 38 x 22 cm Active Small: 38 x 30 cm Active Medium: 40 x 40 cm Active Large /X-large: 40 x 48 cm Contour Small: 36 x 38 cm Contour Medium: 39 x 43 cm Contour Large/X-large: 41 x 48 cm
Rückenlehnenwinkel	4° vorwärts, 22° rückwärts
Höhenverstellung der Rückenlehne	10 cm
Armlehnenpolster, Breite x Länge	9 x 30 cm
Armlehnenhöhe, verstellbar	17-33 cm (klappbare Armlehnen sind Zubehör)
Abstand zwischen den Armlehnen, verstellbar	38,5-52,5 cm
Rahmengröße	55 x 55 cm
Gewicht des Stuhls	39,5 kg
Maximale Belastung	160 kg
Empfohlenes Benutzergewicht, max.	145 kg
Sitzdrehung	Nein
Geschwindigkeit (Power Wheels)	0-4 km/h. Kann über den Joystick an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden
Sicherheit bezüglich Hub und Power Wheels	Die Antriebsräder schalten sich ab, wenn die Sitzhöhe um mehr als 10 cm ansteigt
Power Wheels, Funktion	Die Räder müssen heruntergeklappt sein und den Boden berühren, um Traktion zu gewährleisten
Aufladen	Täglich aufladen
Artikel-Nr.	71011 + 929339 (Wählen Sie die Position des Joysticks auf der rechten oder linken Seite des Stuhls)

*Standardabmessungen sind fett gedruckt markiert

Hinweis: Alle Angaben sind auf die nächsten 0,5 cm gerundet.

HERVORRAGENDER SITZKOMFORT

Aktive Sitze und Rückenlehnen bieten hohen Komfort und leichte Unterstützung. Kontursitze und -rückenlehnen bieten erstklassigen Komfort und starke Unterstützung mit geformter Seitenführung, die Ihre Sitzposition stabilisiert.

Der Standardstoff ist Renewed Loop, der aus 100 % recyceltem Polyester besteht (Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Dieser Stoff zeichnet sich durch außergewöhnliche Abriebfestigkeit, angenehmen Sitzkomfort und hohe Reinigungsstandards aus.

IDEAL FÜR HARTE BÖDEN

Dieser Stuhl ist optimal für harte Böden wie Holz, Fliesen und Linoleum geeignet. Die Nutzung auf Teppichen kann je nach Teppichart sowie Ihrer Kraft und Mobilität herausfordernd sein.

Aus Sicherheitsgründen sollte der Stuhl nicht auf losen Teppichen verwendet werden, da sich diese verschieben, falten oder rutschen können, dadurch kann das Risiko von Unfällen und Stürzen erhöht werden.

HOHE QUALITÄT - HERGESTELLT IN DÄNEMARK

Bei VELA fertigen wir seit 1935 Qualitätsprodukte für sitzende Menschen. Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen, die unsere Produkte nutzen, zu verbessern.

Unsere Stühle sind täglich starker Beanspruchung ausgesetzt. Daher verwenden wir bei VELA robuste mechanische Teile und beziehen die Stühle mit besonders langlebigen Materialien, um sie über viele Jahre hinweg sauber und funktionsfähig zu halten.

Alle VELA-Stühle sind nach der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745 CE-gekennzeichnet. Zudem sind wir nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert, international anerkannte Standards für Qualität und Umwelt.